

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКЛИНАТОР (КОРРЕКТОР ОСАНКИ) ДЕТСКИЙ

APT. 2005

Показания к применению:

Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает формирование правильной осанки у детей и подростков, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, кифозом, кифосколиозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника, формирует привычку держать спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, связанных с неправильной осанкой (нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем). Правильно надетый корректор отводит плечи назад, расправляет грудную клетку и выпрямляет позвоночник. Чувство усталости в мышцах говорит об эффективном применении корректора. Лечебное действие обусловлено эффектом «запоминания правильного положения» позвоночника. Рекомендовано в сочетании с комплексом лечебной физкультуры. Способствует поддержке шейных позвонков в правильном положении.

- Корректирует неправильную осанку и предупреждает сутулость
- Дополнительные съемные металлические ребра жесткости помогают выровнять спину и обеспечить правильную осанку. Ребра при необходимости можно моделировать в зависимости от требуемой степени фиксации.
- Широкие ремни реклинатора мягко распределяют давление на плечи
- Эластичные ремни комфортно располагаются вокруг туловища, удерживая изделие в правильном положении.

Применение

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Реклинатор рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье из хлопка. Закрепите корректор осанки на животе с помощью застежки «липучка». Убедитесь, что ребра жесткости расположены симметрично относительно позвоночного столба. Пропустите ремни реклинатора под мышками и перекрестите их на спине. При расправленных плечах зафиксируйте эластичные ремни под грудной клеткой.

Рекомендованная длительность ношения реклинатора:

- дети 4-8 лет – начинать от 1-2 часов в день, постепенно доводить до 4 часов в день без перерыва или до 6 часов в день с перерывами по 2 часа
- дети 8-16 лет – начинать от 2 часов в день, постепенно доводить до 6 часов в день
- Индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач

Противопоказания:

Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры			Максимальное отклонение
	S	M	L	
Обхват грудной клетки, см	42-50	51-60	61-68	± 1,0 см


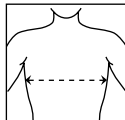


Схема надевания:

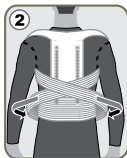

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих масел.

Состав: полиэфир - 44%, латекс - 21%, хлопок - 15%, пенополиуретан - 15%, капрон - 5%, ребра жесткости металлические.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°C до +40°C, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REF MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

МедПак Свисс ГмбХ, Швейцария, Трамштрассе 16, 9442 Бернек, тел.: +41 71 747 11 95,

факс: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепрпетровск, ул. Березинская, 24-А,

тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25.

Сертификат регистрации РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.

MedPack Swiss GmbH является членом MedPack Swiss Group, Швейцария



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

РЕКЛІНАТОР (КОРЕКТОР ПОСТАВИ)

ДИТЯЧИЙ

APT. 2005

Показання щодо використання:

Реклінатор (коректор постави) забезпечує формування правильної постави у дітей і підлітків, зменшує болі у верхньому відділі спини, викликані сколіозом, кіфозом, кіфосколіозом або артритом, запобігає деформаціям хребта, формує звичку тримати спину прямо, допомагає уникнути багатьох захворювань, пов'язаних з неправильною поставою (порушення дихальної, серцево-судинної, травної і інших систем). Коректор, що правильно вдягнуто, відводить плечі назад, розпрямляє грудну клітину і випрямляє хребет. Відчуття втоми в м'язах говорить про ефективне застосування коректора. Лікувальна дія обумовлена ефектом «запам'ятовування правильного положення» хребта. Рекомендовано у поєднанні з комплексом лікувальної фізкультури. Сприяє підтримці шийних хребців в правильному положенні.

- Корегує неправильну поставу і попереджає сутулість
- Додаткові знімні металеві ребра жорсткості допомагають вирівняти спину і забезпечити правильну поставу. Ребра при необхідності можна моделювати залежно від необхідного ступеня фіксації.
- Широкий ремінь реклінатора м'яко розподіляють тиск на плечі
- Еластичні реміні комфортно розташовуються навколо тулуба, утримуючи виріб в правильному положенні.

Застосування:

Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Реклінатор рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну з бавовни. Закріпіть пояс коректора постави на животі за допомогою застібки «липучка». Переконайтеся, що ребра жорсткості розташовані симетрично щодо хребетного стовпа. Пропустіть реміні реклінатора під пахвами і перехрестить їх на спині. При розпрямлених плечах зафіксуйте еластичні реміні під грудною клітиною.

Рекомендована тривалість носіння реклінатора:

- Діти 4-8 років - починати від 1-2 годин на день, поступово доводити до 4 годин на день без перерви або до 6 годин на день з перервами по 2 години
- Діти 8-16 років - починати від 2 годин на день, поступово доводити до 6 годин на день
- Індивідуальний режим і терміни носіння визначає лікар

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносимість компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри			Максимальне відхилення
	S	M	L	
Обхват грудної клітки, см	42-50	51-60	61-68	± 1,0 см



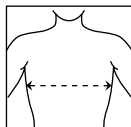


Схема надягання:

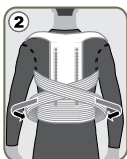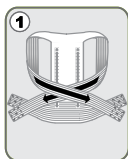

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С. При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Змінення режиму або часу носіння повинне здійснюватися лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не рекомендується використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих розігрівальних мазей.

Склад: поліефір - 44%, латекс - 21%, бавовна - 15%, пенополіуретан - 15%, капрон - 5%, ребра жорсткості металеві.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°C до +40°C, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

EC REP **MedPack Swiss GmbH, Switzerland**, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95,

fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

МедПак Свісс ГмБХ, Швейцарія, Трамштрассе 16, 9442 Бернек, тел.: +41 71 747 11 95,

факс: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com

ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А,

тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ, пр. Кірова, 107-г,

тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно з тарифами, встановленими операторами).

