

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРРЕКТОР ОСАНКИ ЭЛАСТИЧНЫЙ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

АПТ. 2011

Показания к применению:

Корректор осанки с ребрами жесткости корректирует неправильную осанку, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные кифозом, сколиозом, остеопорозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника. Применяется в период реабилитации после операций и травм грудного отдела позвоночника. Эластичные ремни удерживают плечи в правильном положении. Металлические ребра жесткости улучшают осанку и помогают удерживать позвоночник прямо.

- Два ребра жесткости помогают выровнять спину и обеспечить правильную осанку. Ребра при необходимости можно моделировать в зависимости от требуемой степени фиксации.
- Широкие ремни корректора мягко распределяют давление на плечи
- Эластичные ремни комфортно располагаются вокруг туловища, удерживая изделие в правильном положении.

Применение


Реклинатор рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье из хлопка. Закрепить корректор осанки на животе с помощью застежки «липучка». Убедитесь, что ребра жесткости расположены симметрично относительно позвоночного столба. Пропустить ремни реклинатора под мышками и перекрестить их на спине. При расправленных плечах зафиксируйте эластичные ремни под грудной клеткой. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Рекомендованная длительность ношения корректора:

- начинать от 2 часов в день, постепенно доводить до 4 часов в день без перерыва или до 6 часов в день с перерывами по 2 часа;
- индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач.



Противопоказания:

местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья

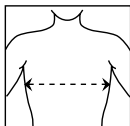

Наименование измерения	Размеры					Максимальное отклонение
	S	M	L	XL	XXL	
Обхват груди на уровне лопаток, см	64-76	77-89	90-102	103-116	117-130	± 1,0 см

Схема надевания:

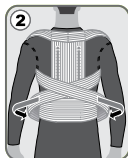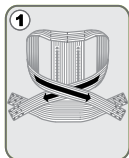

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: полиэфир - 46%, латекс - 42%, капрон - 12%, ребра жесткости металлические.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REP **MedPack Swiss GmbH, Switzerland**, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А, тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6,

тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации

РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.

MedPack Swiss GmbH является членом MedPack Swiss Group, Швейцария



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ КОРЕКТОР ПОСТАВИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ ЕЛАСТИЧНИЙ

APT. 2011

Показання до застосування:

Коректор постави з ребрами жорсткості корегує неправильну поставу, зменшує болі у верхньому відділі спини, викликані кіфозом, сколіозом, остеопорозом або артритом, запобігає деформаціям хребта. Застосовується в період реабілітації після операцій і травм грудного відділу хребта. Еластичні реміні утримують плечі в правильному положенні. Металеві ребра жорсткості покращують поставу і допомагають утримувати хребет прямо. Коректор постави рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну.

- Два ребра жорсткості допомагають вирівняти спину і забезпечити правильну поставу. Ребра при необхідності можна моделювати залежно від необхідного ступеня фіксації.
- Широки реміні коректора м'яко розподіляють тиск на плечі
- Еластичні реміні комфортно розташовуються навколо тулуба, утримуючи виріб в правильному положенні.

Застосування:


Реклінатор рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну з бавовни. Закріпіть коректор постави на животі за допомогою застібки «липучка». Переконайтеся, що ребра жорсткості розташовані симетрично щодо хребетного стовпа. Пропустіть реміні реклінатора під пахвами і перехрестіть їх на спині. При розпрямлених плечах зафіксуйте еластичні реміні під грудною кліткою. Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем.

Рекомендована тривалість носіння реклінатора:

- починати від 2 годин на день, поступово доводити до 4 годин на день без перерви або до 6 годин на день з перервами по 2 години;
- індивідуальний режим і терміни носіння визначає лікар.


Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини

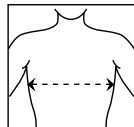

Найменування вимірювання	Розміри					Максимальне відхилення
	S	M	L	XL	XXL	
Обхват грудей на рівні лопаток, см	64-76	77-89	90-102	103-116	117-130	± 1,0 см

Схема надягання:

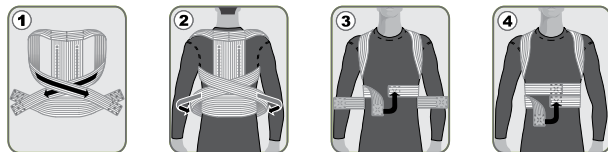

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С. При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Змінення режиму або часу носіння повинне здійснюватись лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не рекомендується використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих розігрівуючих мазей.

Склад: поліефір - 46%, латекс - 42%, капрон - 12%, ребра жорсткості металеві.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

EC REP **MedPack Swiss GmbH, Switzerland**, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

■ ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А,
тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ,
пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно з тарифами, встановленими операторами).

MedPack Swiss GmbH is a member of
MedPack Swiss Group, Switzerland

