

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКЛИНАТОР КЛЮЧИЧНЫЙ УСИЛЕННОЙ ФИКСАЦИИ

APT. 2024

Показания к применению:

Реклинатор (корректор осанки) обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боли в верхнем отделе спины, вызванные сколиозом, кифозом, кифосколиозом или артритом, предотвращает деформации позвоночника, формирует привычку держать спину прямо, помогает избежать многих заболеваний, связанных с неправильной осанкой (нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем). Предупреждает сутулость. Треугольная форма корректора мягко распределяет давление на плечи. Для фиксации снабжен застежкой «липучка».

- Эффективное средство для исправления неправильной осанки и сутулости плеч
- Может применяться при переломах ключицы в период образования костного мозоля
- Фиксирует ключицы в правильном положении для скорейшего выздоровления
- Степень фиксации может быть отрегулирована по необходимости от мягкой до сильной
- Широкие ремни мягко распределяют давление на плечи

Применение

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Реклинатор рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье из хлопка. Пропустить ремни реклинатора под мышками и перекрестить их на спине. При расправленных плечах зафиксируйте ремни с помощью застежки «липучка» спереди под грудной клеткой.

Рекомендованная длительность ношения реклинатора:

- начинать от 2 часов в день, постепенно доводить до 4 часов в день без перерыва или до 6 часов в день с перерывами по 2 часа
- индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач

Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размеры					Максимальное отклонение
	S	M	L	XL	XXL	
Обхват груди на уровне лопаток, см	64-76	77-89	90-102	103-116	117-130	± 1,0 см

Схема надевания:



Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: полиэфир- 56%, хлопок - 20%, пенополиуретан - 20%, латекс - 4%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REP MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А, тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25.

MedPack Swiss GmbH является членом MedPack Swiss Group, Швейцария

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛІНАТОР КЛЮЧИЧНИЙ ПОСИЛЕНОЇ ФІКСАЦІЇ

APT. 2024

Показання до застосування:

Реклінатор (коректор постави) забезпечує формування правильної постави, зменшує болі у верхньому відділі спини, викликані сколіозом, кіфозом, кіфосколіозом або артритом, запобігає деформаціям хребта, формує звичку тримати спину прямо, допомагає уникнути багатьох захворювань, пов'язаних з неправильною поставою (порушення дихальної, серцево-судинної, травної і інших систем). Попереджає сутулість. Трикутна форма коректора м'яко розподіляє тиск на плечі. Для фіксації забезпечений застібкою "липучка".

- Ефективний засіб для виправлення неправильної постави і сутулості плечей
- Може застосовуватися при переломах ключиці в період утворення кісткового мозоля
- Фіксує ключиці в правильному положенні для швидкого одужання
- Ступінь фіксації може бути відрегульована за потреби від м'якої до сильної
- Широкі ремені м'яко розподіляють тиск на плечі

Застосування:

Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Реклінатор рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну з бавовни. Пропустіть ремені реклінатора під пахвами і перехрестіть їх на спині. При розпрямлених плечах зафіксуйте ремені за допомогою застібки «липучка» спереду під грудною кліткою.

Рекомендована тривалість носіння реклінатора:

– Починати від 2 годин на день, поступово доводити до 4 годин на день без перерви або до 6 годин на день з перервами по 2 години

– індивідуальний режим і терміни носіння визначає лікар

Протипоказання:

Запальні захворювання шкіри в області застосування виробу, індивідуальна непереносимість матеріалів, з яких виготовлений виріб.

Найменування вимірювання	Розміри					Максимальне відхилення
	S	M	L	XL	XXL	
Обхват грудей на рівні лопаток, см	64-76	77-89	90-102	103-116	117-130	± 1,0 см

Схема надягання:



Догляд за виробом: Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С. При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби: Використовувати виріб виключно за призначенням. Змінення режиму або часу носіння повинне здійснюватись лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не рекомендується використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих розігрівуючих мазей.

Склад: поліефір - 56%, бавовна - 20%, пенополіуретан - 20%, латекс - 4%.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

EC REP **MedPack Swiss GmbH, Switzerland**, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ, пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).

MedPack Swiss GmbH є членом
MedPack Swiss Group, Швейцарія

