

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРСЕТА (ГРУДО-ПОЯСНИЧНЫЙ)

APT. 3001

Показания к применению:

Корсет помогает ограничить объем движений в поясничном и грудном отделе позвоночника, обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боль в верхнем и нижнем отделе спины. Используется при грыжах дисков, смещении дисков, изменении формы дисков, сколиозе, кифозе, спондилезе, спондилолистезе, иррадирующих болях, переломах позвоночника и при реабилитации после лечения указанных заболеваний. Осуществляет стабилизацию грудного и поясничного отделов позвоночника и удерживает мышцы передней брюшной стенки.

- Два съемных металлических ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку в грудном и поясничном отделах спины. Ребра при необходимости можно моделировать в зависимости от требуемой степени фиксации.
- Широкие ремни корсета мягко распределяют давление на плечи
- Дополнительные ремни обеспечивают необходимый уровень компрессии поясницы
- Воздухопроницаемый облегченный материал корсета обеспечивает максимальный комфорт при использовании

Применение

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер корсета подбирается по обхвату талии согласно таблице. Корсет рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье в положении лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности.

Рекомендованная длительность ношения корсета:

– начинать от 2 часов в день, постепенно доводить до 4 часов в день без перерыва или до 6 часов в день с перерывами по 2 часа

– индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач.

Противопоказания:

Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры				Максимальное отклонение
	XS/S	M/L	XL/XXL	XXXL/XXXXL	
Обхват талии, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

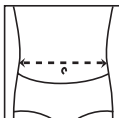


Схема надевания:



Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор).

Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Регулировка или изменение степени поддержки должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не используйте изделие во время применения согревающих мазей.

Состав: полиэфир - 41%, латекс - 45% капрон - 14%, ребра жесткости металлические.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REP MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А,

тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М»

105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25.



MedPack Swiss GmbH является членом MedPack Group, Швейцария



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ КОРСЕТ (ГРУДО-ПОПЕРЕКОВИЙ)

APT. 3001

Показання щодо використання:

Корсет допомагає обмежити об'єм рухів в поперековому і грудному відділі хребта, забезпечує формування правильної постави, зменшує біль у верхньому і нижньому відділі спини. Використовується при грижах дисків, зсуві дисків, зміні форми дисків, сколіозі, кіфозі, спондиліозі, спондилолистозі, болях, що іррадіують, переломах хребта і при реабілітації після лікування вказаних захворювань. Здійснює стабілізацію грудного і поперекового відділів хребта і утримує м'язи передньої черевної стінки.

- Два зніми металеві ребра жорсткості забезпечують надійну підтримку в грудному і поперековому відділах спини. Ребра при необхідності можна моделювати залежно від необхідного ступеня фіксації.
- Широки реміні корсета м'яко розподіляють тиск на плечі
- Додаткові реміні забезпечують необхідний рівень компресії поясиці
- Повітропроникний полегшений матеріал корсета забезпечує максимальний комфорт при використанні

Застосування:

Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір корсета підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Корсет рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну в положенні лежачи на спині на рівній жорсткій або напівжорсткій поверхні.

Рекомендована тривалість носіння корсета:

- Починати від 2 годин на день, поступово доводити до 4 годин на день без перерви або до 6 годин на день з перервами по 2 години
- Індивідуальний режим і строки носіння визначає лікар.

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносимість компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри				Максимальне відхилення
	XS/S	M/L	XL/XXL	XXXL/XXXXL	
Обхват талії, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

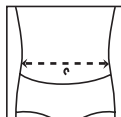


Схема надягання:



Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Регулювання або зміна ступеня підтримки повинна здійснюватися тільки за рекомендацією Вашого лікаря. Не використовуйте виріб під час застосування зігріваючих мазей.

Склад: поліефір - 41%, латекс - 45%, капрон - 14%, ребра жорсткості металеві.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці

EC REP **MedPack Swiss GmbH, Switzerland**, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ, пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).

MedPack Swiss GmbH є членом MedPack Group, Швейцарія

