

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. 3011

КОРСЕТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ эластичный (с 4 ребрами жесткости)

Показания к применению:

Корсет применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, травмах, ущемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря 4 ребрам жесткости корсет обеспечивает надежную поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения.

- 4 съемных стальных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
- Дополнительные эластичные ремни комфортно располагаются вокруг талии и обеспечивают необходимый уровень компрессии поясницы
- Комплектуется съемной подушечкой под изгиб поясницы для отличного прилегания к телу
- Корсет хорошо моделирует контуры тела и незаметен под одеждой


Применение:

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер корсета подбирается по обхвату талии согласно таблице. Корсет рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье. Надевать изделие рекомендуется в положении лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности. Застегивать липучку нужно на глубоком вдохе при втянутом животе. Затем натянуть и закрепить боковые ремни. Время использования корсета – от 2 до 12 часов в сутки в зависимости от заболевания, рекомендаций врача и состояния здоровья. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.

Противопоказания:

Наименование измерения	Размеры								Максимальное отклонение
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
Обхват талии, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	± 1,0 см

Схема надевания:

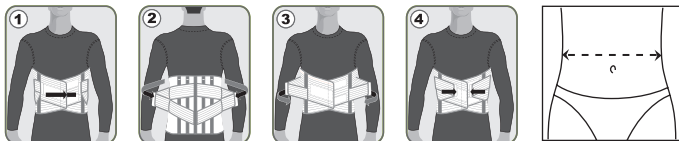

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: не надевайте изделие во время применения согревающих мазей.

Состав: Полиэфир- 40%(polyether), латекс - 24% (latex), х/б - 14% (cotton), пенополиуретан - 15% (penopoleuritan), капрон - 7% (kapron), ребра жесткости стальные (steel splints).

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

Сделано по заказу: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

■ **Производитель:** ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

APT. 3011

КОРСЕТ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
еластичний (з 4 ребрами жорсткості)

Показання до застосування:

Корсет застосовується при остеохондрозі, радикуліті, зсувах і грижах міжхребетних дисків, травмах, утисках нервів, травмах, хронічних болях в попереково-крижовому відділі хребта. Завдяки 4 ребрам жорсткості корсет забезпечує надійну підтримку попереку, розслаблення м'язів спини і нормалізацію кровообігу.

- 4 знімних сталевих ребра жорсткості забезпечують надійну підтримку і фіксацію в попереково-крижовому відділі хребта
- Додаткові еластичні реміні комфортно розташовуються навколо талії і забезпечують необхідний рівень компресії поясици
- Комплектуються знімною подушечкою під вигин поясици для відмінного прилягання до тіла
- Корсет добре моделює контури тіла і непомітний під одягом

Застосування:

Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір корсета підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Корсет рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну. Надягати виріб рекомендується в положенні лежачи на спині на рівній жорсткій або напівжорсткій поверхні.


Застебнути липучку потрібно на глибокому вдиху при втягнутому животі. Потім натягнути і закріпити бічні реміні. Час використання корсета — від 2 до 12 годин на добу залежно від захворювання, рекомендацій лікаря і стану здоров'я. Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри								Максимальне відхилення
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
Обхват талії, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	± 1,0 см

Схема надягання

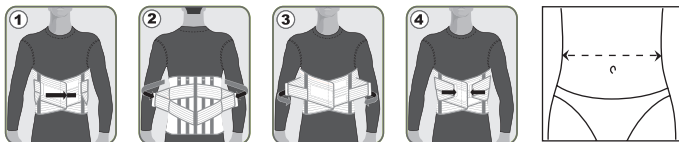

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С. При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби: не надягайте виріб під час застосування зігріваючих мазей.

Склад: поліефір - 40%(polyether), латекс - 24% (latex), бавовна - 14% (cotton), пенополіуретан - 15% (reporoleuritan), капрон - 7% (kapron), ребра жорсткості зі сталі (steel splints).

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці

Вироблено на замовлення: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442, Berneck, phone: +41 71 747 11 95, e-mail: info@medpack-group.com, fax: +41 71 747 11 91, www.medpack-group.com.

■ **Виробник:** ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49038, Україна, Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27/31, тел./факс: +38 0562 31 81 04, info@dolphin.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 100 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).



ISO 9001:2008
ISO 13485:2010



MedPack
group
МедПак груп