

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. 3051

КОРСЕТ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ

Показания к применению:

Предназначен для фиксации и разгрузки поясничного отдела позвоночника с одновременным прогреванием при хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, радикулите, ревматизме, неврите и других заболеваниях поясничной области. Обладает тепловым и поддерживающим эффектом. В состав входит натуральная овечья шерсть, обладающая терапевтическим действием.

Применяется в комплексном лечении и профилактике:



- заболеваний опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз, ишиас);
- заболеваний мочеполовой системы (мочекаменная болезнь, нефрит, простатит, воспаление придатков).

Незаменим при тяжелых физических нагрузках, при работе на холоде, в условиях повышенной влажности. Защищает область поясницы от травм. Пластиковые ребра жесткости обеспечивают дополнительную поддержку в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, предохраняют от скручивания при использовании. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач.

Противопоказания:

местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры				Максимальное отклонение
	XS / S	M / L	XL / XXL	XXXL / XXXXL	
Обхват талии, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

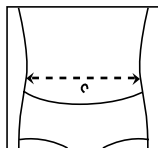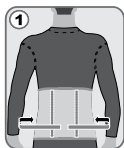Схема надевания:**Уход за изделием:**

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: шерсть – 50%, хлопок – 10%, полиэфир – 20%, пенополиуретан - 12%, капрон - 5%, латекс – 3%, ребра жесткости пластиковые.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REP MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепрпетровск, ул. Березинская, 24-А,

тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6,

тел. 495 648 15 25.

MedPack Swiss GmbH является членом
MedPack Swiss Group, Швейцария



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

APT. 3051

КОРСЕТ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ

Показання щодо використання:

Призначений для фіксації та розвантаження поперекового відділу хребта з одночасним прогріванням при хронічних болях в попереково-крижовому відділі хребта, радикуліті, ревматизмі, невриті та інших захворюваннях поперекової області. Має тепловий і підтримуючий ефект. У склад входять натуральна овеча шерсть, що має терапевтичну дію. Застосовується у комплексному лікуванні і профілактиці:

- захворювань опорно-рухового апарату (радикуліт, остеохондроз, ішіас);
- захворювань сечостатевої системи (сечокам'яна хвороба, нефрит, простатит, запалення придатків).



Незамінний при важких фізичних навантаженнях, при роботі на холоді, в умовах підвищеної вологості. Захищає область попереку від травм. Пластикові ребра жорсткості забезпечують додаткову підтримку в попереково-крижовому відділі хребта, запобігають від скручування при використанні. Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Індивідуальний режим і строки носіння визначає лікар.

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносимість компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри				Максимальне відхилення
	XS / S	M / L	XL / XXL	XXXL / XXXXL	
Обхват талії, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

Схема надягання:

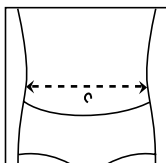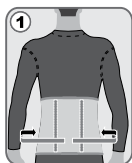

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Змінення режиму або часу носіння повинне здійснюватись лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не рекомендується використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих розігріваючих мазей.

Склад: вовна - 50%, бавовна - 10%, поліефір - 20%, пінополіуретан - 12%, капрон - 5%, латекс - 3%, ребра жорсткості пластикові.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

EC REP MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А,

тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ,

пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно з тарифами, встановленими операторами).

MedPack Swiss GmbH є членом

MedPack Swiss Group, Швейцарія