

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ (с ребрами жесткости)

APT. 4001

Показания к применению:

Бандаж применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, защемлениях нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря 3 ребрам жесткости бандаж обеспечивает надежную поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения. Также бандаж может использоваться после родов и после операций на брюшной стенке. Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию передней брюшной стенки и предотвращает расхождение послеоперационных швов.

- 3 съемных стальных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
- Уменьшение боли и профилактика травм поясницы
- Обеспечивает поддержку мышц живота в послеоперационном или послеродовом периоде
- Предупреждает расхождение послеоперационных швов и возникновение послеоперационных грыж живота

Применение:


Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер бандажа подбирается по обхвату талии согласно таблице. Бандаж рекомендуется надевать непосредственно на нижнее белье. Надевать изделие рекомендуется в положении лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности. Застегнуть липучку нужно на глубоком вдохе при втянутом животе. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.

Противопоказания:

Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры								Максимальное отклонение
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
Обхват талии, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	± 1,0 см

Схема надевания:

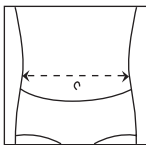

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Регулировка или изменение степени поддержки должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не используйте изделие во время применения согревающих мазей.

Состав: латекс - 43%, полиэфир - 42%, капрон - 15%, ребра жесткости стальные.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REP MEDPACK SWISS, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А, тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации РФ № ФС3 2011/10231 от 19.07.2011.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ

(с ребрами жорсткості)

APT. 4001

Показання до застосування:

Бандаж застосовується при остеохондрозі, радикуліті, зсувах і грижах міжхребетних дисків, затисканнях нервів, травмах, хронічних болях в попереково-крижовому відділі хребта. Завдяки 3 ребрам жорсткості бандаж забезпечує надійну підтримку поясиці, розслаблення м'язів спини і нормалізацію кровообігу. Також бандаж може використовуватися після пологів і після операцій на черевній стінці. Бандаж підтримує м'язи живота, забезпечує помірну компресію передньої черевної стінки і запобігає розбіжності післяопераційних швів.

- З знімних сталевих ребра жорсткості забезпечують надійну підтримку і фіксацію в попереково-крижовому відділі хребта
- Зменшення болю і профілактика травм попереку
- Забезпечує підтримку м'язів живота в післяопераційному або післяродовому періоді
- Попереджає розбіжність післяопераційних швів і виникнення післяопераційних гриж живота

Застосування:


Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір бандажа підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Бандаж рекомендується надягати безпосередньо на нижню білизну. Надягати виріб рекомендується в положенні лежачи на спині на рівній жорсткій або напівжорсткій поверхні. Застібнути липучку потрібно на глибокому вдиху при втягнутому животі. Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри								Максимальне відхилення
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
Обхват талії, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	± 1,0 см

Схема надягання:

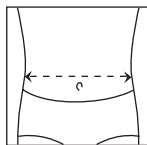

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Регулювання або зміна ступеня підтримки повинна здійснюватися тільки за рекомендацією Вашого лікаря. Не використовувати виріб під час застосування зігріваючих мазей.

Склад: латекс - 43%, поліефір - 42%, капрон - 15%, ребра жорсткості зі сталі.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці

EC REF MEDPACK SWISS, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,
e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

■ ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А,
тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49038, Україна, Дніпропетровськ,
вул. Ленінградська, 27/31, e-mail: info@dolphicom.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 100 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).