

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. 4002

БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ

Показания к применению:

Бандаж используется для восстановления мышечного тонуса после родов и после операций, предотвращает расхождение послеоперационных швов. Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию и уменьшает отвисание живота.

- Предназначен для поддержки живота после операций и родов
- Предупреждает расхождение послеоперационных швов и возникновение послеоперационных грыж живота
- Хорошо моделирует контуры тела и незаметен под одеждой
- Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании

Применение:

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.


Необходимый размер бандажа подбирается по обхвату талии согласно таблице. Бандаж рекомендуется надевать в положении лежа на спине, непосредственно на хлопчатобумажное белье. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.

Противопоказания:

Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры								Максимальное отклонение
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
Обхват талии, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	± 1,0 см

Схема надевания:

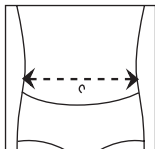

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° C.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Регулировка или изменение степени поддержки должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не используйте изделие во время применения согревающих мазей.

Состав: латекс - 44%, полиэфир - 41%, капрон - 15%, ребра жесткости пластиковые.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°C до +40°C, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REP MEDPACK SWISS, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А,

тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОШАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6,

тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

APT. 4002

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
ЕЛАСТИЧНИЙ

Показання до застосування:

Бандаж використовується для відновлення м'язового тону після пологів і після операцій, запобігає розбіжності післяопераційних швів. Бандаж підтримує м'язи живота, забезпечує помірну компресію і зменшує відвисання живота. Бандаж надягати в положенні лежачи на спині, безпосередньо на бавовняну білизну.

- Призначений для підтримки живота після операцій і пологів
- Попереджає розходження післяопераційних швів і виникнення післяопераційних гриж живота
- Добре моделює контури тіла і непомітний під одягом
- Повітропроникний полегшений матеріал бандажа забезпечує максимальний комфорт при використанні

Застосування:

Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір бандажа підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Бандаж рекомендується надягати в положенні лежачи на спині, безпосередньо на бавовняну білизну.



Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини

Найменування вимірювання	Розміри								Максимальне відхилення
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
Обхват талії, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	± 1,0 см

Схема надягання:

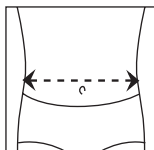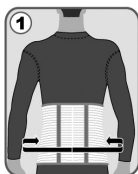

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Регулювання або зміна ступеня підтримки повинна здійснюватися тільки за рекомендацією Вашого лікаря. Не використовуйте виріб під час застосування зігріваючих мазей.

Склад: латекс - 44%, поліефір - 41%, капрон - 15%, ребра жорсткості пластикові.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці

EC REP MEDPACK SWISS, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49038, Україна, Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27/31, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 100 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).