

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. 4011

БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Показания к применению:

Бандаж используется для восстановления мышечного тонуса после родов и после операций, предотвращает расхождение послеоперационных швов. Поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию и уменьшает отвисание живота.

- Благодаря плотной передней стенке обеспечивает надежную фиксацию и поддержку передней брюшной стенки после операции на брюшной полости и после родов
- Способствует формированию прочного послеоперационного рубца и предупреждает возникновение послеоперационных грыж живота
- Бандаж можно применять как согревающий для спины (в случае надевания застежкой назад)

Применение:

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер бандажа подбирается по обхвату талии согласно таблице. Бандаж рекомендуется надевать в положении лежа на спине, непосредственно на белье из хлопка.




Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.

Противопоказания:

Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры				Максимальное отклонение
	XS / S	M / L	XL / XXL	XXXL / XXXXL	
Обхват талии, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

Схема надевания:

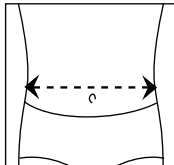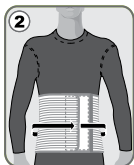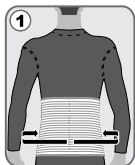

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° C.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: латекс - 25%, полиэфир - 45%, капрон - 10%, хлопок - 10%, пенополиуретан - 10%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

EC REP MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А,

тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М», 105120, г. Москва,

Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25.



MedPack Swiss GmbH является членом MedPack Swiss Group, Швейцария



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

APT. 4011

БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Показання до застосування:

Бандаж використовується для відновлення м'язового тону після пологів і після операцій, запобігає розбіжності післяопераційних швів. Підтримує м'язи живота, забезпечує помірну компресію і зменшує відвисання живота.

- Завдяки щільній передній стінці забезпечує надійну фіксацію і підтримку передньої черевної стінки після операції на черевній порожнині і після пологів
- Сприяє формуванню міцного післяопераційного рубця і попереджає виникнення післяопераційних гриж живота
- Бандаж можна застосовувати як зігріваючий для спини (у разі надягання застілкою назад)

Застосування:




Перед використанням обов'язково порадьтесь із лікарем. Необхідний розмір бандажа підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Бандаж рекомендується надягати в положенні лежачи на спині, безпосередньо на бавовняну білизну. Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри				Максимальне відхилення
	XS / S	M / L	XL / XXL	XXXL / XXXXL	
Обхват талії, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

Схема надягання:

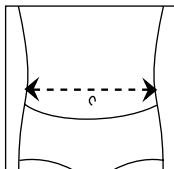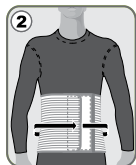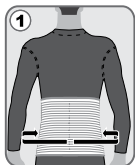

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Змінення режиму або часу носіння повинне здійснюватись лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не рекомендується використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих розігріваючих мазей.

Склад: латекс- 25%, поліефір - 45%, капрон - 10%, бавовна - 10%, пенополиуретан - 10% .

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

EC REP **MedPack Swiss GmbH, Switzerland**, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,
phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,
e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

■ ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А,
тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ,
пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно з тарифами, встановленими операторами).

MedPack Swiss GmbH є членом
MediPack Swiss Group, Швейцарія

