

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ СОГРЕВАЮЩИЙ

APT. 4045

Показания к применению:

Для обеспечения компрессии и мягкой фиксации поясницы. Уменьшает боль, благодаря согревающему и микромассажному действию. Может применяться для похудения, уменьшения толщины подкожной жировой клетчатки в области живота при занятиях спортом и гимнастикой. Для фиксации бандаж снабжен застежкой «липучка» и оригинальным петельным покрытием.

- Оказывает согревающее и микромассажное действие
- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию поясницы
- Воздухопроницаемый неопрен (аэропрен) обладает уникальным свойством задерживать тепло тела, не препятствуя дыханию кожи
- Хорошо моделирует контуры тела

Применение:




Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер бандажа подбирается за обхватом талии согласно таблице. Бандаж рекомендуется надевать в положении лежа на спине, желательна на белье из хлопка. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.

Противопоказания:

Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры				Максимальное отклонение
	XS / S	M / L	XL / XXL	XXXL / XXXXL	
Обхват талии, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

Схема надевания:

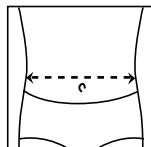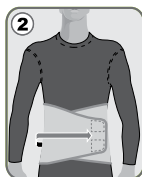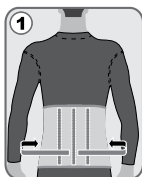

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности:

Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: аэропрен - 60%, полиэфир - 20%, хлопок - 15%, латекс - 5%, ребра жесткости пластиковые.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck,

phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

МедПак Свисс ГмбХ, Швейцария, Трамштрассе 16, 9442 Бернек,

тел.: +41 71 747 11 95, факс: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com


ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А,

тел./факс: +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва,

Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25.

МедПак Свисс ГмбХ является членом
МедПак Свисс Групп, Швейцария

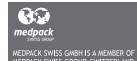

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

APT. 4045

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ

Показання до застосування:

Для забезпечення компресії і м'якої фіксації попереку. Зменшує біль завдяки зігріваючій і мікромасажній дії. Може застосовуватися для схуднення, зменшення товщини підшкірної жирової клітковини в області черева при заняттях спортом і гімнастикою. Для фіксації бандаж забезпечений застібною "липучка" і оригінальним петельним покриттям.

- Надає зігріваючу і мікромасажну дію
- Забезпечує м'яку фіксацію і компресію поясици
- Повітропроникний неопрен (азропрен) володіє унікальною властивістю затримувати тепло тіла, не перешкоджаючи диханню шкіри
- Добре моделює контури тела

Застосування:




Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір бандажа підбирається за обхватом талії згідно таблиці. Бандаж рекомендується надягати в положенні лежачи на спині, бажано на білизну з бавовни. Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

Місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри				Максимальне відхилення
	XS / S	M / L	XL / XXL	XXXL / XXXXL	
Обхват талії, см	50-70	71-90	91-110	111-130	± 1,0 см

Схема надягання:

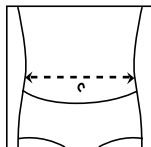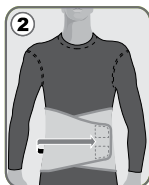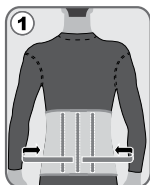

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби:

Використовувати виріб виключно за призначенням. Змінення режиму або часу носіння повинне здійснюватись лише за рекомендацією Вашого лікаря. Не рекомендується використання виробу протягом 30 хвилин після застосування місцевих розігріваючих мазей.

Склад: аеропрен - 60%, поліефір - 20%, бавовна - 15%, латекс - 5%, ребра жорсткості пластикові.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

EC REP MedPack Swiss GmbH, Switzerland, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: info@med-textile.com, www.medtextile-swiss.com.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49000, Україна, Дніпропетровськ, пр. Кірова, 107-г, тел./факс: +38 0562 31 81 04, e-mail: info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 103 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України з 9.00 до 18.00 по буднях; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно з тарифами, встановленими операторами).

MedPack Swiss GmbH є членом MedPack Swiss Group, Швейцарія

