

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. 4501

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ

Показания к применению:

Бандаж применяется в период беременности для уменьшения болей в поясничном отделе позвоночника и бедрах. Мягко поддерживая живот, бандаж обеспечивает оптимальные условия для правильного положения плода. Благодаря двум съемным ребрам жесткости эффективно снимает напряжение в нижней части спины и поддерживает живот во время беременности. Воздухопроницаемый эластичный материал, из которого изготовлен бандаж обеспечивает комфорт при использовании в любое время года.

- Снимает боли в области поясницы и бедер
- Предотвращает появление растяжек на животе
- Позволяет сохранять правильную осанку и продолжать активный образ жизни в период беременности
- Незаметен под одеждой


Применение:

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер бандажа подбирается по обхвату бедер согласно таблице. Изделие надевают утром на весь день. В дородовой период надевать бандаж в положении лежа на спине, слегка приподняв бедра, поверх нижнего белья, широкой частью на поясничный отдел и зафиксировать под животом контактной лентой «липучкой». На ночь бандаж необходимо снимать. Данная модель бандажа может использоваться после родов для восстановления тонуса мышц живота. При этом предварительно необходимо извлечь пластмассовые ребра жесткости из широкой части бандажа. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.

Противопоказания:

Местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.


Наименование измерения	Размеры						Максимальное отклонение
	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Обхват бедер, см	89-97	98-106	107-115	116-124	125-134	135-144	± 1,0 см

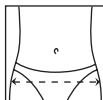

Схемы надевания:

схемы надевания бандажа до родов

схемы надевания бандажа после родов

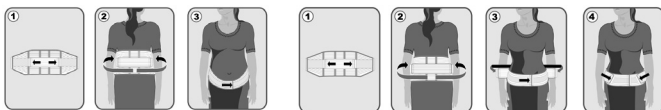

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: не надевайте изделие во время применения согревающих мазей.

Состав: полиэфир - 47% (polyether), латекс - 41% (latex), капрон - 12% (kapron), ребра жесткости пластиковые (plastic splints).

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

Сделано по заказу: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

■ **Производитель:** ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепрпетровск, ул. Березинская, 24-А, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Поставщик: ООО «ЭКОШАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

APT. 4501

БАНДАЖ ДО- І ПІСЛЯПОЛОВОГИЙ

Показання до застосування:

Бандаж застосовується в період вагітності для зменшення болів в поперековому відділі хребта і стегнах. М'яко підтримуючи живіт, бандаж забезпечує оптимальні умови для правильного положення плоду. Завдяки двом знімним ребрам жорсткості ефективно знімає напругу в нижній частині спини і підтримує живіт під час вагітності. Повітропроникний еластичний матеріал, з якого виготовлений бандаж, забезпечує комфорт при використанні у будь-який час року.

- Знімає болі в області поясиці і стегон
- Запобігає появі розтяжок на животі
- Дозволяє зберігати правильну поставу і продовжувати активний спосіб життя в період вагітності
- Непомітний під одягом

Застосування:

Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір бандажа підбирається за обхватом стегон згідно таблиці. Виріб надягають вранці на весь день. У допологовий період надягати бандаж в положенні лежачи на спині, злегка підвівши стегна, поверх нижньої білизни, широкою частиною на поперековий відділ і зафіксувати під животом контактною стрічкою-«липучкою». На ніч бандаж необхідно знімати. Дана модель бандажа може використовуватися після пологів для відновлення тону м'язів живота. При цьому заздалегідь необхідно витягувати пластмасові ребра жорсткості з широкої частини бандажа. Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри						Максимальне відхилення
	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Обхват стегон, см	89-97	98-106	107-115	116-124	125-134	135-144	± 1,0 см



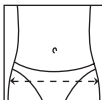


Схема надягання:

Схема надягання бандажу перед пологами

Схема надягання бандажу після пологів

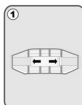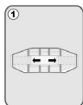

Догляд за виробом:

Практи м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби: не надягайте виріб під час застосування зігріваючих мазей.

Склад: поліетер - 47%(polyether), латекс - 41% (latex), капрон - 12% (капрон), ребра жорсткості пластикові (plastic splints).

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

Вироблено на замовлення: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442, Berneck, phone: +41 71 747 11 95, e-mail: info@medpack-group.com, fax: +41 71 747 11 91, www.medpack-group.com.

■ **Виробник:** ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49038, Україна, Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27/31, тел./факс: +38 0562 31 81 04, info@dolphin.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 100 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).



ISO 9001:2008
ISO 13485:2010



MedPack
group
МедПак груп