

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. 5001

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ЛЕВО- И ПРАВОСТОРОННИЙ

Показания к применению:

Бандаж применяется при паховых и бедренных грыжах с целью предупреждения развития осложнений, а также в послеоперационный период для профилактики рецидива грыжи. Также бандаж используется для предупреждения увеличения грыжи при значительных физических нагрузках, связанных с поднятием тяжестей. Бандаж снабжен двумя съемными пелотами (вставками): лево- и правосторонним, которые переставляются в зависимости от локализации грыжи. Бандаж изготовлен в виде эластичного пояса и имеет дополнительную лямку, которая позволяет регулировать степень давления пелота (вставки) на участок грыжи. Бандаж одевать только на вправленную грыжу.

- Обеспечивает локальную компрессию на участок грыжевого выпячивания
- Съемные пелоты (вставки) уникальной анатомической формы комфортно и надежно удерживают грыжи от выпадения
- Позволяет регулировать степень компрессии с помощью эластичных ремней
- Воздухопроницаемый облегченный материал бандажа обеспечивает максимальный комфорт при использовании


Применение:

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер бандажа подбирается по обхвату бедер согласно таблице. Бандаж следует надевать лежа на спине, на белье или непосредственно на тело. При небольших грыжах, если нет необходимости в значительной компрессии, пелот (вставку) можно заменить ватным тампоном необходимого размера. Длительность ежедневного использования – не более 8 часов. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.


Противопоказания:

ущемленные и невправимые грыжи, местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры						Максимальное отклонение
	XS	S	M	L	XL	XXL	
Обхват бедер, см	78-87	88-95	96-105	106-117	117-125	126-134	± 1,0 см

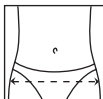

Схемы надевания:

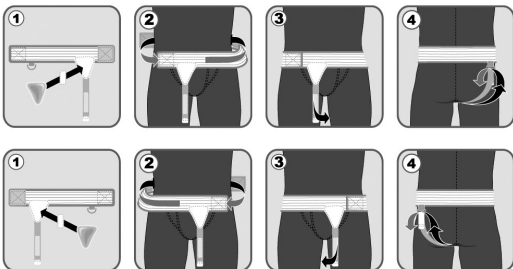

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: не надевайте изделие во время применения согревающих мазей.

Состав: полиэфир - 56%(polyether), латекс - 35% (latex), капрон - 9% (capron), полукольцо металлическое (metallic semiring), пелоты (foam pads).

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

Сделано по заказу: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91,

e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

■ **Производитель:** ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепрпетровск, ул. Березинская, 24-А, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ

ЛІВО- ТА ПРАВОСТОРОННІЙ

APT. 5001

Показання до застосування:

Бандаж застосовується при пахових і стегнових грижах з метою попередження розвитку ускладнень, а також в післяопераційний період для профілактики рецидиву грижі. Також бандаж використовується для попередження збільшення грижі при значних фізичних навантаженнях, пов'язаних з підняттям тяжкості. Бандаж забезпечений двома знімними пелотами (вставками): ліво- і правостороннім, які переставляються залежно від локалізації грижі. Бандаж виготовлений у вигляді еластичного поясу і має додаткову лямку, яка дозволяє регулювати ступінь тиску пелота (вставки) на ділянку грижі. Бандаж одягати тільки на вправлену грижу.

- Забезпечує локальну компресію на ділянку грижового випинання
- Знімні пелоти (вставки) унікальної анатомічної форми комфортно і надійно утримують грижі від випадання
- Дозволяє регулювати ступінь компресії за допомогою еластичних ремнів
- Повітропроникний полегшений матеріал бандажа забезпечує максимальний комфорт при використанні

Застосування:

Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір бандажа підбирається за обхватом стегон згідно таблиці. Бандаж слід надягати лежачи на спині, на білизну або безпосередньо на тіло. При невеликих грижах, якщо немає необхідності в значній компресії, пелот (вставку) можна замінити ватяним тампоном необхідного розміру. Тривалість щоденного використання – не більше 8 годин. Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

ущемлені і невправимі грижі, місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносимість компонентів сировини.

Найменування вимірювання	Розміри						Максимальне відхилення
	XS	S	M	L	XL	XXL	
Обхват стегон, см	78-87	88-95	96-105	106-117	117-125	126-134	± 1,0 см


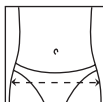


Схема надягання:

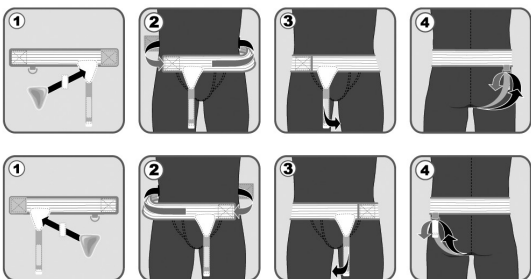

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С. При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби: не надягайте виріб під час застосування зігріваючих мазей.

Склад: поліефір - 56%(polyether), латекс - 35% (latex), капрон - 9% (капрон), півкільце металеве (metallic semiring), пелоти (foam pads).

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, березти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

Вироблено на замовлення: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442, Berneck, phone: +41 71 747 11 95, e-mail: info@medpack-group.com, fax: +41 71 747 11 91, www.medpack-group.com.

■ **Виробник:** ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49038, Україна, Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27/31, тел./факс: +38 0562 31 81 04, info@dolph.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 100 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).



ISO 9001:2008
ISO 13485:2010



MedPack
group
МедПак груп