

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. 5011

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ

Показания к применению:

Бандаж применяется при паховых и бедренных грыжах с целью профилактики развития осложнений, а также в послеоперационный период для профилактики рецидива грыжи. Также бандаж используется для профилактики увеличения грыжи при значительных физических нагрузках связанных с поднятием веса. Бандаж имеет 2 съёмных пелота, которые можно ставить в лево- или правостороннее положение в зависимости от локализации грыжи. Бандаж изготовлен из эластичного пояса и имеет дополнительные ремни, которые позволяют регулировать степень компрессии пелота на участок грыжи.

- Профилактика развития осложнений при паховой и бедренной грыжах
- Обеспечение локальной компрессии на участок грыжевого выпячивания
- Эффективная профилактика рецидивов грыжи в послеоперационный период
- Регулирование степени компрессии с помощью ремней
- Съёмные пелоты (вставки) уникальной анатомической формы комфортно и надёжно удерживают грыжи от выпадения

Применение:


Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер бандажа подбирается по обхвату бедер согласно таблице. Бандаж следует надевать лежа на спине, на бельё или непосредственно на тело. Длительность ежедневного использования – не более 8 часов. Индивидуальный режим и сроки ношения бандажа определяет врач.

Противопоказания:

Ущемленные и невправимые грыжи, местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Наименование измерения	Размеры			Максимальное отклонение
	XS / S	M / L	XL / XXL	
Обхват бедер, см	80-97	98-115	116-134	± 1,0 см

Схема надевания:

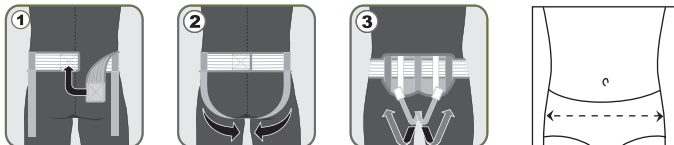

Уход за изделием:

Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С.

При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: не надевайте изделие во время применения согревающих мазей.

Состав: полиэфир - 59% (polyether), латекс - 21% (latex), пенополиуретан - 15% (penopoleuritan), капрон - 5% (kapron), пелоты (foam pads).

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

Сделано по заказу: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, phone: +41 71 747 11 95, fax: +41 71 747 11 91, e-mail: info@medpack-group.com, www.medpack-group.com.

■ **Производитель:** ООО «Техномедика», 49130, Украина, г. Днепропетровск, ул. Березинская, 24-А, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Поставщик: ООО «ЭКОСНАБ М» 105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. 495 648 15 25. Сертификат регистрации РФ № ФСЗ 2011/10231 от 19.07.2011.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

APT. 5011

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ УНІФІКОВАНИЙ

Показання до застосування:

Бандаж застосовується при пахових і стегнових грижах з метою профілактики розвитку ускладнень, а також в післяопераційний період для профілактики рецидиву грижі. Також бандаж використовується для профілактики збільшення грижі при значних фізичних навантаженнях пов'язаних з підняттям ваги. Бандаж має 2 знімних пелоти, які можна ставити в ліво- або правосторонньому положенні залежно від локалізації грижі. Бандаж виготовлений з еластичного ремня і має додаткові ремні, які дозволяють регулювати ступінь компресії пелота на ділянку грижі.

- Профілактика розвитку ускладнень при паховій і стегновій грижах
- Забезпечення локальної компресії на ділянку грижового випинання
- Ефективна профілактика рецидивів грижі в післяопераційний період
- Регулювання ступеня компресії за допомогою ремнів
- Знімні пелоти (вставки) унікальної анатомічної форми комфортно і надійно утримують грижі від випадання

Застосування:


Перед використанням обов'язково порадьтеся із лікарем. Необхідний розмір бандажа підбирається за обхватом стегон згідно таблиці. Бандаж слід надягати лежачи на спині, на білизні або безпосередньо на тіло. Тривалість щоденного використання – не більше 8 годин. Індивідуальний режим і терміни носіння бандажа визначає лікар.

Протипоказання:

Ущемлені і невправимі грижі, місцеві захворювання шкіри, індивідуальна непереносність компонентів сировини.

Найменування вимірювання	розмір			Максимальне відхилення
	XS / S	M / L	XL / XXL	
Обхват стегон, см	80-97	98-115	116-134	± 1,0 см

Схема надягання:

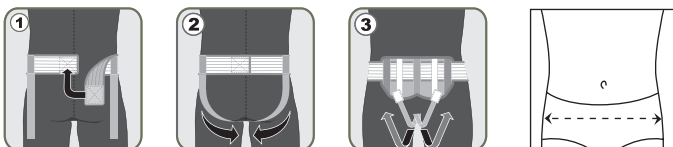

Догляд за виробом:

Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище +35° С.

При пранні і полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла. Не прасувати. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор). Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Запобіжні засоби: не надягайте виріб під час застосування зігріваючих мазей.

Склад: поліетер - 59% (polyether), латекс - 21% (latex), пенополіуретан - 15% (penopoleuritan), капрон - 5% (капрон), пелоти (foam pads).

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, при температурі від +5°С до +40°С, берегти від прямих сонячних променів.

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Після закінчення строку придатності виробник не гарантує збереження достатньої еластичності виробу.

Розмір: див. на упаковці.

Дата виробництва: див. на упаковці.

Вироблено на замовлення: MEDPACK GROUP, SWITZERLAND, Tramstrasse 16, 9442, Berneck, phone: +41 71 747 11 95, e-mail: info@medpack-group.com, fax: +41 71 747 11 91, www.medpack-group.com.

■ **Виробник:** ТОВ «Техномедика», 49130, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 24-А, тел./факс +38 056 378 99 56, e-mail: office@medtextile.com.ua, www.medtextile.com.ua.

Дистриб'ютор: ТОВ «Долфі-Україна», 49038, Україна, Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27/31, тел./факс: +38 0562 31 81 04, info@dolphi.com.ua.

Інформаційна лінія: 0 800 600 100 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів у межах України; тарифікація дзвінків з інших телефонів - згідно тарифів, встановлених операторами).