

НАДКРОВАТНАЯ ТРАПЕЦИЯ

(OSD-96V)



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Данное изделие соответствует D.Lgs 46/97 согласно европейской Директиве 93/42/ЕЕС.

Виробник: HONG KY CO., LTD.
BINH CHUAN PRODUCTION
ZONE 7200, BINH DUONG
PROVINCE, VIETNAM
Імпортер: ТОВ "ОСД Східна
Європа", м. Київ

[osd.import@gmail.c](mailto:osd.import@gmail.com)

[om](http://osd.com)

СР	9405/2010
	24.03.2010

Мы признательны вам за приобретение нашего изделия. Вся наша продукция спроектирована и изготовлена из материалов наивысшего качества, чтобы предложить максимальный комфорт и безопасность пользователю.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 70КГ. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЭТОТ ЛИМИТ.

- Изделие готово к эксплуатации, не требует какого-либо технического вмешательства или дополнительной модернизации.
- Периодически осматривайте изделие на наличие видимых повреждений.
- В случае необходимости специфического технического вмешательства обратитесь к вашему дилеру. Дальнейшая эксплуатация изделия возможна только после устранения всех неполадок.
- До начала эксплуатации изделия убедитесь, что трапеция закреплена правильно и надежно.
- При установке и регулировке надкроватной трапеции остерегайтесь зажима пальцев рук!

ВНИМАНИЕ: параметры и иллюстрации изделия, предоставленные в этом руководстве приблизительные, могут незначительно отличаться от действительных. Производитель оставляет за собой вносить изменения в характеристики изделия без уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ


1. ОПИСАНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4. СБОРКА
5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
6. ГАРАНТИЯ
7. ДИРЕКТИВА 93/42 СЕЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОПИСАНИЕ

Надкроватьная трапеция OSD-96V состоит из узла крепления и непосредственно из надкроватьной трапеции, крепления треугольника и треугольника.

Изделие полностью разбирается, компактно складывается; удобно для транспортировки, хранения и перемещения.

Изделие используется пациентами, находящимся на постельном режиме, в длительном лежачем состоянии при необходимости приподняться или сесть на кровати. Если надобности в трапеции нет, её можно легко отсоединить.

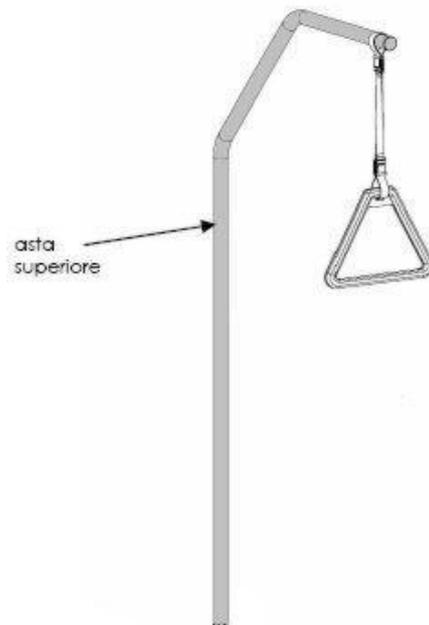

Комплектующие:

Крепление треугольника и треугольник
Штанга
Узел крепления штанги (ключ в комплекте)

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Расстояние трапеции до лежака кровати:	95/130 см
Вес:	5,8 кг
Макс. высота трапеции:	192 см
Глубина трапеции:	74 см
Длина крепления треугольника:	45 см
Макс. допустимая нагрузка:	70 кг

3. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещать надкроватьную трапецию следует у изголовья кровати. Чтоб приподняться на кровати пациенту необходимо всего лишь ухватиться за треугольник и подтянуться. При эксплуатации надкроватьной трапеции пациенту может понадобиться помощь ассистента, что значительно облегчит и обезопасит его действия и движения.

4. СБОРКА

1. Разберите узел крепления трапеции для установки на спинке кровати



2. Установите узел крепления трапеции и саму трапецию на спинке кровати.



3. Отрегулируйте высоту трапеции.
4. Зафиксируйте надкроватьную трапецию винтами при помощи ключа до полной фиксации.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Надкроватьная трапеция OSD-96V не требует каких-либо специфических методов технического обслуживания. Рекомендуем чистку и уход за изделием производить с помощью мягкой сухой ветоши. В случае необходимости изделие можно мыть водой с использованием мягких моющих средств. Не применяйте растворители и абразивные вещества.

Периодически тщательно осматривайте изделие на наличие поломок или повреждений. В случае обнаружения технических неполадок НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие. При повторной установке надкроватьной трапеции проверьте надёжность её фиксации.

6. ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный ремонт проводится только в течении гарантийного срока.
2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;

б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);

в) если изделие используется не по назначению;

3. Гарантия не распространяется на:

а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;

б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей;

4. Товар подлежит обмену только в случае неисправности.

Дата продажи _____

МП _____