

Протипролежневий матрац з системою А/В/С OSD-QDC-501В

Інструкція користувача



Дякуємо, що віддали перевагу нашій продукції.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу.

Зміст

1. Опис
2. Використання
3. Характеристики
4. Гарантія

1. Опис

Система складається з двох частин: секційного матраца та компресора змінного тиску. Тихий і компактний, компресор також відрізняється низьким енергоспоживанням. Панель управління проста і зручна для користувача. Через кожні 12 хвилин тиск у матраці змінюється за допомогою послідовного надування і здування повітряних ячеек. Доведено, що постійний тиск на виступаючі частини тіла є основною причиною виникнення пролежнів. Безперервна масажна дія знижує тиск і покращує циркуляцію повітря.

2. Використання

1. Розмістіть матрац на ліжку таким чином, щоб компресор перебував у нижній частині ложа.


2. Використовуйте вбудовані гачки для надійної фіксації компресора на спинці ліжка біля ніг або на місці з гладкою та рівною поверхнею.

3. Підключіть компресор до матраца за допомогою повітряного шланга.

4. Підключіть компресор до розетки. Переконайтеся, що шнур живлення знаходиться в безпечному положенні.

5. Увімкніть кнопку живлення на панелі управління компресора. Матрац автоматично почне заповнюватися повітрям.

6. Коли матрац буде повністю надутий, налаштуйте його згідно з потребами користувача, використовуючи тумблер на панелі управління.

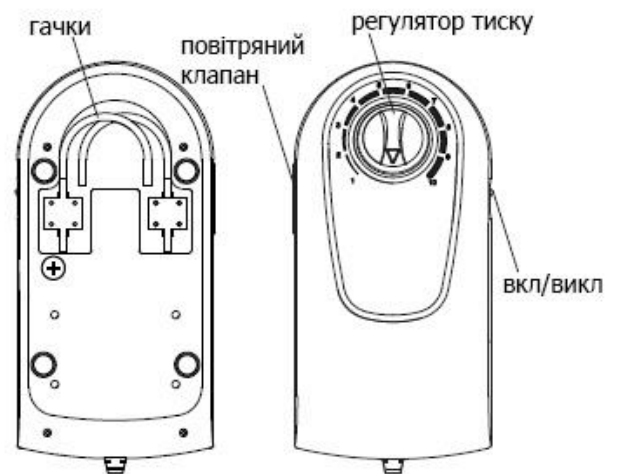

Увага!

1. Не паліть поблизу компресора.
2. Тримайте компресор подалі від гарячих поверхней.
3. Є ризик пошкодження системи при використанні поблизу займистих речовин.

3. Характеристики

Ефективність проти пролежнів	1-3 ст.
Зміна циклу	12 хв.
Робочий тиск	50-120 мм.рт.ст
Вага Матрац: Компресор:	4,5 кг 1,4 кг
Максимальне навантаження Вага користувача:	145 кг
Живлення Потужність: Запобіжники:	~ 220V, 50/60 Гц, 0.1A T1A, 250V
Умови навколишньої середовища Температура: Вологість:	10°C - 40°C 10% - 75%
Умови зберігання та транспортування Температура: Відносна вологість:	-18°C +43°C 10% - 95%

В комплекті: матрац, компресор, з'єднувальні трубки, 1 запасна секція, чохол



4. Умови гарантії

ТОВ "ОСД Східна Європа " гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції;
 - б) при наявності слідів стороннього втручання (наприклад, спроба самостійного ремонту виробу тощо);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, що викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, що викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою і таке інше.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи день купівлі виробу.

Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

Увага!

1. Не кладіть на протипролежневий матрац важкі предмети (звичайний матрац, матрац на спіненому матеріалі тощо).
2. Стежте за тим, щоб не штрикнути матрац будь-яким гострим предметом.
3. Не паліть, лежачи чи сидячи на матраці.
4. Для миття (чистки) матрацу використовуйте лише м'які миючі засоби.
5. Не розбирайте повітряний насос для виконання його ремонту чи модифікації.
6. Коли матрац використовуєте, завжди накривайте його чистим бавовняним простиралом.
7. Не прикладайте занадто великий тиск до малих частин надувного матрацу.
8. Ні в якому разі не використовуйте для прання і сушки матрацу пральну машину чи сушку.
9. Не тримайте нагрівальні пристрої поблизу матраца.
10. Не допускайте падіння повітряного насосу.
11. Тримайте електричні прилади на відстані від води (тобто дотримуйтеся правил безпеки під час користування побутовими електричними предметами).

Дата: _____

Печатка / Підпис: _____